

MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE REF.150 ELSANEK

Made in Spain

Rev.5



	EN14683	BFE	Respirabilidad	Lavados
ESPECIFICACIÓN ESPAÑOLA	UNE0065:2020	93'38%	32'6%	5 ciclos
ESPECIFICACIÓN EUROPEA	CWA-17553:2020	82%	21'6%	50 ciclos

ANEXO INFORMATIVO AITEX versión 3 (22/06/2020)

Mascarillas Higiénicas desechables y reutilizables según Acuerdo Europeo de CEN (Comité Europeo de Normalización) CWA 17553:2020 Community dace coverings—Guide to minimum requirement, methods of Testing and use.

Se aceptan dos niveles de filtración para BFE según Norma EN 14683:2019 + AC:2019:

Nivel 90%; $\geq 90\%$ Nivel 70%; $\geq 70\%$



BARRERA BACTERIANA

(BFE) Bacterial filtration efficiency



RESPIRABILIDAD

Presión Diferencial (Pa/cm²)

OLEFINE
PROPIEDADES PERMANENTES



0% ALGODÓN
0% FIBRAS HIDRÓFILAS

Tejido de baja absorción y rápido secado.
Rápida eliminación de la humedad.
Propiedades bacteriostáticas y antifúngicas.



ANTIESTATICO

Tejido disipador de cargas electroestáticas



REUTILIZABLE

Tejidos con características inherentes



RECICLABLE 100%

Todos los componentes de esta mascarilla se reciclan. Tejidos 100% recuperables.



DISPONIBLE EN TALLA INFANTIL

Adulto: Referencia 400 **Infantil:** Referencia 401

TEJIDO: ELSANEK 150

Composición: Olefine—Antistatic

Peso: 150 gr/m²




NºInforme:
L/0073767-2 (CWA17553:2020)
Certificado por Organismo
de Control AIJU
www.ajju.es
informacion@ajju.es

NºInforme:
2020TM1670 (UNE0065:2020)
Certificado por Organismo
de Control nº0161
www.aitex.es
info@aitex.es

INSTRUCCIONES DE USO

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425";

Adultos

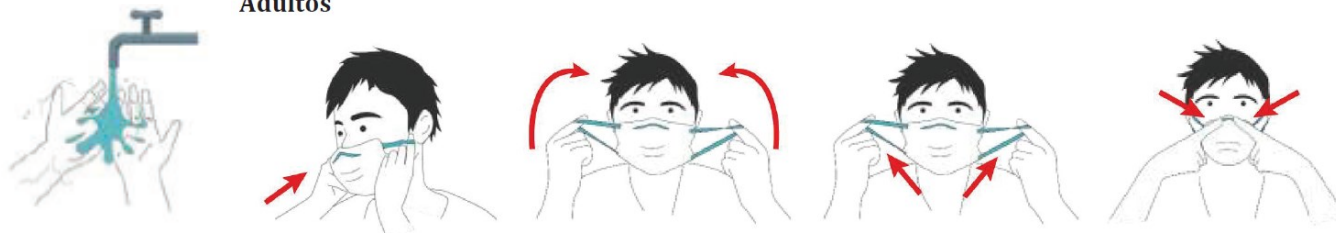

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de solución hidroalcohólica o con agua y jabón.
- Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la mascarilla.
- Supervise la colocación, uso y retirada de la mascarilla en menores.
- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
- La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.
- No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.
- Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.
- En caso de desperfecto, desechar la mascarilla.

Para quitarse la mascarilla: quítela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Para que la prenda mantenga el 100% de sus prestaciones, es imprescindible seguir estas recomendaciones de lavado. Olefine acepta cualquier detergente o multiuso desinfectante del hogar así como lejía. Recomendamos el lavado manual y secado al aire.



Permite de uso de lejía, cloro o cualquiera otro detergente.



Temperatura de lavado a máquina: recomendado 40°C / máx. 60°C



Secado para secadora: recomendada 40°C. Duración máxima 5 minutos a baja temperatura.



NO PLANCHAR